



CENTROVET
Ciencia en Salud Animal®

TUBERTEST®

Tuberculina PPD Bovina – Diagnóstico de Tuberculosis Bovina

Registro SAG N° 2383



Diagnóstico

INDICACION

Diagnóstico de tuberculosis bovina mediante intradermoreacción simple (sólo administración de Tuberculina PPD Bovina) o comparativa, que consiste en la administración simultánea e intradérmica de Tuberculina PPD Bovina y Tuberculina PPD Aviar.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de producto contiene

Derivado proteico purificado de *Mycobacterium bovis* cepa AN5

2.145 – 4.875 UI

Excipientes c.s.p.

0.1 mL

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administrar 0,1 mL por vía intradérmica. Utilizar jeringas de tuberculina de 1 mL con graduación de 0,1 mL, y agujas hipodérmicas calibre 24 o 26 de 0,5 a 1 cm de largo. Realizar lectura a las 72 horas posterior a la aplicación, midiendo el grosor de la reacción con un cutímetro o pie de metro. La interpretación de los resultados debe realizarse de acuerdo a lo establecido por el SAG en el instructivo I-PP-VE-009

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No debe usarse en animales tratados con corticoides u otros depresores del sistema inmune.

No debe usarse en hembras próximas al parto o postparto.

La prueba no debe repetirse hasta que hayan transcurrido al menos 42 días, para evitar falsos positivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado, entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN

Estuche conteniendo 5 mL (50 dosis).

Bajo licencia de Virbac Uruguay S.A.

FT0031NAC31082018R1V1

Fabricado por:
Virbac Uruguay S.A. – Av. Millán 4175 – Montevideo CP 12900 – Uruguay.
Teléfono: (598) 23075757, Fax: (598) 23079112

Importado y distribuido por:
Centrovét Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.
Teléfono: (56-2) 25837700 / Fax: (56-2) 25837701
e-mail: centrovét@centrovét.com; www.centrovét.com

